

# 一次性使用取样器说明书

说明书版本：A/0

说明书编制日期：2019年12月5日

**【产品名称】** 一次性使用取样器

**【产品型号规格】**

DSC-KC、DSC-DKC、DSC-KE、DSC-DKE、TFS-TC、FS-H10、NFS-TB、NFS-TB1、TFS-TD1、TFS-T、NFS-T、TFS-TD、TFS-TE、TFS-TF、TFS-TG、UFS-TA

**【产品描述（主要机构组成）】** 通常由拭子和/或含保存液的试管等组成。非无菌提供。

**【产品适用范围】** 用于样本的收集、运输和储存等。

**【禁忌症】** 无。

**【产品性能】**

## 2.1外观

2.1.1拭子头应为柔软、富有弹性的白色纤维、洁净、无杂质。

2.1.2拭子柄应表面光滑、无毛刺、无斑点、有弹性。

2.1.3保存液应澄清，无肉眼可见悬浮杂质或沉淀。

## 2.2牢固性

拭子头应缠绕在拭子柄上端应牢固，应不得脱落。

**【安装与使用说明】**

拆开包装，取出拭子和试管，用拭子采集样本后，然后放进装有保存液的试管内。

**【注意事项】**

1、采集样本必须保持新鲜，及时保存于保存液中。

2、保存液不可用于人体或者动物内服或者外用。

**【配件清单】** 一次性使用取样器×1套、说明书×1份、合格证×1份。

**【生产日期】** 见标签

**【使用期限】** 2年

医疗器械生产备案凭证编号：粤深食药监械生产备20160033号

**医疗器械产品备案凭证编号：粤深械备20190957号**

**医疗器械产品技术要求编号：粤深械备20190957号**

**生产企业：深圳远健生物科技有限公司**

**生产企业生产地址：深圳市龙岗区龙岗街道龙东社区爱南路78号利好工业园13  
栋4楼401号**

**电 话：0755-28591602**

**邮 编：518108**